

Instrukcja użycia opatrunków opartych na Metodzie Sorbact®

Rany powierzchniowe sączące się

1. Oczyszczyć ranę, zgodnie z zaleceniami.
2. Delikatnie przyciskać powierzchnię rany okrągłym gazikiem Sorbact®. Zaleca się zmieniać gazik kilka razy.
3. Przykryć ranę opatrunkiem adsorbującym Sorbact® (zieloną powierzchnią do rany!).
4. Przymocować opatrunek plastrem lub bandażem.

Rany głębokie sączące się

1. Oczyszczyć ranę, zgodnie z zaleceniami.
2. Delikatnie przyciskać powierzchnię rany okrągłym gazikiem Sorbact®. Zaleca się zmieniać gazik kilka razy.
3. Rozwinąć jeden lub kilka kompresów albo taśmę z gazy Sorbact® i wypełnić niszę rany (nie upychać). Przykryć ranę opatrunkiem adsorbującym Sorbact® (zieloną powierzchnią do rany).
4. Należy zawsze zostawić fragment opatrunku poza niszą głębokiej rany, co ułatwi jego późniejszą wymianę.

Przetoki

1. Do przetoki włożyć taśmę z gazy odpowiedniego rozmiaru. Jeśli trzeba pociąć taśmę, należy złożyć ją na pół i włożyć do przetoki, zostawiając oba końce na zewnątrz otworu przetoki. Przykryć opatrunkiem adsorbującym Sorbact® (zieloną powierzchnią do rany).

Zakażenia grzybicze w fałdach skóry

1. Na powierzchnię zakażoną grzybami nałożyć szeroką taśmę z gazy lub kompres. Przymocować za pomocą bielizny (biustonosz, majtki, slipki). Jeśli to konieczne - dodatkowo przymocować plastrem, na zewnątrz zakażonej powierzchni.
2. Zmieniać opatrunek codziennie. Kontynuować leczenie jeszcze kilka dni po ustąpieniu objawów.

Zakażenia grzybicze między palcami stóp

1. Umieścić taśmę z gazy 2 cm x 50 cm pomiędzy palcami stóp (luźno, tzw. „zygzakiem”) i przymocować do górnej powierzchni stopy.
2. Zmieniać opatrunek codziennie.

Do ran od słabo sączących się do suchych należy użyć opatrunek Sorbact®gel

Instrukcja użycia opatrunku żelowego Sorbact®gel

Powierzchniowe i głębokie rany

1. Oczyszczyć ranę zgodnie z ogólnymi zaleceniami.
2. Położyć opatrunek żelowy Sorbact®gel bezpośrednio na ranę. Przykryć drugim opatrunkiem, odpowiednio zabezpieczającym wysychanie opatrunku żelowego Sorbact®gel.
3. Opatrunek zmieniać raz dziennie, co trzeci dzień.