

---

## Sorbact®gel - opatrunek żelowy adsorbujący bakterie

### Opakowania

Opatrunek żelowy sterylny, pakowany indywidualnie, do jednorazowego użycia.

Wymiary:

7,5 cm x 7,5 cm

7,5 cm x 15 cm



### Kiedy nie należy stosować opatrunków żelowych Sorbact®gel?


Sorbact®gel nie powinien być stosowany w ranach, które jednocześnie leczone są maściami lub kremami zawierającymi tłuszcze. Tłuszcze blokują hydrofobowy efekt wiązania bakterii i grzybów do powierzchni opatrunków.

### O czym należy pamiętać stosując opatrunek Sorbact®gel ?

Ważne jest, aby opatrunek żelowy Sorbact®Gel ściśle przylegał do rany.

Sorbact®gel jest przeznaczony do jednorazowego użytku.

Aby uzyskać najlepszy efekt leczniczy niezbędne jest ściśle stosowanie się do instrukcji użycia opatrunku.

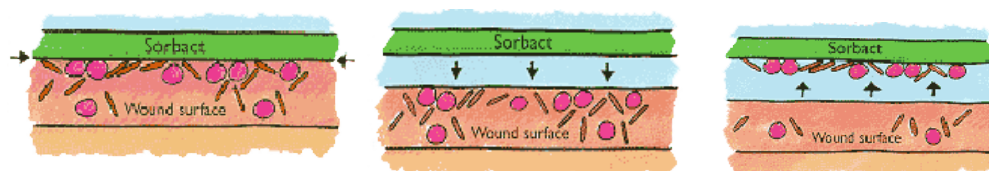

### Działania niepożądane

Nie są znane.

---